

แนวทางปฏิบัติในการใช้เครื่อง Infusion pump รุ่น LF-600 และ LM-700

Infusion pump รุ่น LM-700

1. สารละลายที่ต้องใช้ Infusion pump ตามแนวทางปฏิบัติของฝ่ายบริการพยาบาลที่ต้องตั้งค่าเป็นจุดทศนิยม หรือให้ Rate > 300 cc/hr.
2. สารละลายที่มีความหนืด Ex TPN / Lipid / Kabiven เพราะถ้าใช้รุ่น LF-600 เครื่องจะจ่ายสารละลายไม่ตรง
3. สารละลายที่มีฟอง ปรับเป็นหยดไม่ได้ ส่งผลให้ Drip Sensor ของเครื่อง LF - 600 จับหยดไม่ได้ ส่งผลให้เครื่อง Alarm + ไม่ทำงาน Ex IMG / Cordarone / Taxalteor เป็นต้น
4. สารละลายที่มีโอกาสปรับ Rate ระหว่าง 1 - 3 และปลดเพื่อเปลี่ยน Set IV ไม่ได้ หรือไม่ใช่ Volutrol เพราะ รุ่น LF - 600 ตั้ง Rate ได้ 2 แบบ
 - 20 drop/cc ตั้ง Rate 3 - 300 cc/hr.
 - 60 drop/cc ตั้ง Rate 1 - 100 cc/hr.EX ยาแก้ปวดทาง epidural cath

Infusion pump รุ่น LF - 600

1. สารละลายทุกตัวที่ต้องใช้ Infusion pump ตามแนวทางปฏิบัติของฝ่ายบริการพยาบาล ยกเว้น สารละลายที่มีข้อจำกัด ตาม ข้อ 1 - 4 ของการใช้เครื่องรุ่น LM - 700
2. ยาเคมีบำบัดให้ใช้ LF - 600 คู่กับ Set 700 เพื่อความสะดวกในการไล่ air (ชั่วคราวจนกว่าบริษัทจะเปลี่ยน Filter ของ Set 600 มาไว้ด้านล่าง)

ตามแนวทางปฏิบัติของฝ่ายบริการพยาบาล intransit 20/10/17
ตามที่ระบุไว้ข้างต้น ให้ทราบต่อไปให้ : อัญมณี อ.

Am
13/11/17